



DE MIKROADHÄSIVE WUNDAUFLAGE MIT POLYABSORBIERENDEN FasERN

PRODUKTbeschreibung

UrgoClean ist eine Innovation der Laboratoires URGO in Form einer sterilen Vlieskompressen aus hochabsorbierenden und kohäsiven polyabsorbierenden Fasern (Polyacrylat).

Diese Innovation beruht darauf, die Polyacrylatfasern in einer parallel zur Wunde verlaufenden Ebene durch Thermostanzung strukturell miteinander zu verbinden, wodurch **UrgoClean** seine spezifischen Eigenschaften erhält:

- Absorbieren und einschließen von fibrinösen Belägen und Wundexsudat
- Hohe Zugfestigkeit

Die polyabsorbierenden Fasern der **UrgoClean** Kompressen sind mit einer mikroadhäsiven TLC-Wundheilungsmatrix (Technology LipidoColloid) beschichtet, die leicht ein Gel bildet und auf diese Weise die Ableitung (Drainage) von fibrinösen Belägen sowie die Positionierung und das Ablösen der Wundauflage erleichtert.

Wirkmechanismus

- In Kontakt mit dem Wundexsudat bilden die Lipidkolloidpartikel der TLC-Wundheilungsmatrix ein Gel, welches für ein feuchtes, die Wundreinigung begünstigendes Milieu sorgt.

- Gleichzeitig bilden die polyabsorbierenden Polyacrylatfasern ein Gel, binden fibrinöse Beläge, absorbieren diese und leiten sie in die Faserstruktur ab (autolytische Wundreinigung).

- Infolgedessen wird durch die Fixierung und Drainage der fibrinösen Beläge aufgrund der polyabsorbierenden Struktur von **UrgoClean** in Verbindung mit der TLC-Wundheilungsmatrix die Reinigung fibrinöser Wunden begünstigt.

Eigenschaften

- Absorption der Exsudate, Gelbildung und Drainage der fibrinösen Geweberückstände in der Reinigungsphase
- Absorption und Einschließen von Bakterien durch die Struktur der polyabsorbierenden Polyacrylatfasern

- In Kontakt mit der Wunde Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, das die Wundheilung der gereinigten Wundbereiche begünstigt
- Erleichterte Kontrolle schwacher Blutungen
- Ablösen der Wundauflage in einem Stück dank der Zugfestigkeit der polyabsorbierenden Fasern
- Atraumatisches und schmerzfreies Ablösen der Wundauflage sowie Schutz der Wundumgebung dank der mikroadhäsiven TLC-Wundheilungsmatrix.

Indikationen

UrgoClean ist unmittelbar ab der Reinigungsphase für exsudierende, chronische Wunden (Unterschlenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera, unter anderem Malum perforans) und potentiell fibrinöse Wunden wie akute Wunden (Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische Wunden), postoperative Wunden und tumorbedingte Wunden geeignet.

Hinweise für die Anwendung

1 – Vorbereitung der Wunde:

- Die Wunde nach dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, ist die Wunde vor der Anwendung von **UrgoClean** sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung zu spülen.
- Die Verwendung von **UrgoClean** schließt eine mechanische Reinigung nicht aus, sofern diese notwendig ist.

2 – Auflegen des Verbandes:

- Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite abziehen.
- Die mikroadhäsive Seite von **UrgoClean** direkt auf die Wunde und ihre Unebenheiten auflegen.
- Falls notwendig kann **UrgoClean** mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.
- **UrgoClean** mit einem an die Lokalisation und den Exsudationsgrad der Wunde angepassten Sekundärverband abdecken.

3 – Verbandwechsel:

UrgoClean sollte während der Reinigungsphase der Wunde alle 1 bis 2 Tage gewechselt werden, danach sollte die Häufigkeit der Verbandwechsel an das Volumen des Wundexsudates und an die klinische Entwicklung der Wunde angepasst werden (maximale Tragedauer 7 Tage). Nicht verwendete Reste von **UrgoClean** gemäß den lokal geltenden Vorschriften entsorgen.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

- Die mikroadhäsive TLC-Matrix von **UrgoClean** haftet an chirurgischen Handschuhen aus Latex. Deshalb wird empfohlen, beim Umgang mit der Wundauflage den Kontakt mit der beschichteten Seite zu vermeiden oder sterile Pinzetten zu verwenden.
- Die gleichzeitige Anwendung einer Creme, einer Salbe oder einer Emulsion wird nicht empfohlen.
- Während der Reinigungsphase kann es, bedingt durch die fortschreitende Beseitigung von fibrinösem Gewebe, zu einer Vergrößerung der Wunde kommen.
- Aufgrund ihrer nicht okklusiven Eigenschaften kann **UrgoClean** unter strenger medizinischer Überwachung auch bei infizierten Wunden angewendet werden.
- **UrgoClean** darf nicht in einer Überdruck-Kammer angewendet werden.
- Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.
- Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Die Wundauflage nicht verwenden, wenn die sterile Einzelverpackung beschädigt ist.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken verursachen.

Kontraindikationen

- Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen **UrgoClean** oder einen der Bestandteile.
- **UrgoClean** nicht als chirurgische Kompressen bei stark blutenden Wunden anwenden.

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH;
Justus-von-Liebig-Str. 16; 66280 Sulzbach

CE 0459 (2011)

i (2017-05)

STERILE R





NL ZACHTKLEVENDE VERBAND MET POLYABSORBERENDE VEZELS

BESCHRIJVING

UrgoClean-pad, een innovatief product van URGO, is een steriel, non-woven verband van sterk absorberende en cohesieve polyabsorberende vezels (polyacrylaat).

Om de polyacrylaat vezels te binden wordt gebruik gemaakt van thermobinding. De vezels zijn zo gerangschikt dat **UrgoClean** specifieke eigenschappen vertoont in het absorberend vermogen, het vasthouden van het debris uit de wond in het verband en vormvastheid.

Het verband met polyabsorberende vezels is bedekt met een zachtklevende TLC-laag (Technology Lipido-Colloid) die eenvoudig geleert en vergemakkelijkt daardoor de drainage en vasthouden van debris in het verband en maakt het aanbrengen en verwijderen van het verband makkelijker

WERKINGSMECHANISME

- Bij contact met exsudaat vormen de lipidocolloïde deeltjes van de TLC-laag een gel, waardoor een vochtig milieu wordt gecreëerd dat wondreiniging bevordert.
- Tegelijkertijd geleren de polyabsorberende polyacrylaatvezels en hechten zich aan het debris, dat hierdoor wordt geabsorbeerd en afgevoerd, wat bijdraagt aan de eliminatie (autolytisch debridement).
- Deze binding en afvoer van debris door **UrgoClean's** polyabsorberende structuur versterken zodoende in combinatie met de TLC-laag de debridementfase in wonden met debris en exsudaat.

EIGENSCHAPPEN

- Absorptie van exsudaat, gelering en drainage van debris.
- Het absorberen en vasthouden van bacteriën door de structuur van polyabsorberende polyacrylaatvezels.
- Creëren en handhaven van een vochtig wondmilieu in contact met de wond, wat de genezing bevordert.

- Haemostatische werking bij licht bloedverlies uit de wond.
- Dankzij de vormvastheid van de polyabsorberende vezels kan het verband in één keer in z'n geheel worden verwijderd.
- Pijnloze verwijdering zonder beschadiging van het wondbed en bescherming van de omringende huid door de zachtklevende TLC-laag.

INDICATIES

UrgoClean is geïndiceerd voor de reiniging van chronische exsuderende wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet) en voor potentieel necrotiserende/fibrineuze wonden: acute wonden (brandwonden, schaafwonden, traumatische wonden), postoperatieve wonden en oncologische wonden.

GEbruIKSAANWIJZING

1 – Wondpreparatie:

- Reinig de wond volgens lokaal protocol en spoel de wond eventueel na met fysiologische zoutoplossing.
- Als er eerder een ontsmettingsmiddel gebruikt is, spoel de wond dan zorgvuldig met fysiologische zoutoplossing alvorens **UrgoClean** aan te brengen.

-Het gebruik van **UrgoClean** neemt de eventuele noodzaak van mechanisch debridement niet weg.

2 – Aanbrengen van het verband:

- Verwijder de beschermende folie.
- Breng de zachtklevende kant van **UrgoClean** aan op de wond en over de wondranden.

UrgoClean kan indien nodig met een steriele schaar op maat van de wond worden geknipt.

-Bedek **UrgoClean** af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat.

3 – Verbandwisselingen:

UrgoClean-verbanden moet tijdens de wondreinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen, en daarna zo vaak als nodig is (maximaal 7 dagen laten zitten), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond. Gooi ongebruikte delen van het verband weg volgens de plaatselijke procedures.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK

-De zachtklevende TLC-laag van **UrgoClean** hecht zich aan latex handschoenen. Dit kan worden voorkomen door de vingertoppen licht te bevochtigen of gebruik te maken van een steriel pincet.

- Gelijktijdig gebruik van een crème, lotion, zalf of emulsie wordt afgeraden.
- Dankzij de niet-occlusieve aard van dit verband kan **UrgoClean** onder strikt medisch toezicht op geïnfecteerde wonden worden gebruikt.
- Door het reinigend effect van **UrgoClean** kan de wond groter lijken. Dit komt door de effectieve verwijdering van debris.
- UrgoClean** mag niet worden gebruikt in een hyperbare kamer.
- Het verband niet opnieuw steriliseren.
- [*] Controleer voor gebruik of de steriele verpakking intact is. Gebruik de inhoud niet wanneer de verpakking is beschadigd.
- Steriel, per stuk verpakt voor eenmalig gebruik: hergebruik van verband voor eenmalig gebruik verhoogt de kans op infectie.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken als er een bekende overgevoeligheid bestaat voor **UrgoClean**.
- Gebruik **UrgoClean** niet als operatiespons voor hevige bloedende wonden.

Nederlandse vestiging: URGO Nederland B.V.; Spinding 3A; 5431SN Cuijk

CE 0459 (2011)

 (2017-05)

STERILE R



Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France