

DE SELBSTHAFTENDER SCHAUMSTOFFWUNDVERBAND MIT MIKROADHÄSIVER TLC-MATRIX
PRODUKTBE SCHREIBUNG

UrgoTul Foam Border ist ein selbsthaftender, absorbierender Schaumstoffwundverband mit mikroadhäsiver TLC-Matrix, einer innovativen Technologie, die von Laboratoires URGO entwickelt wurde. **UrgoTul Foam Border** besteht aus:

- einer mikroadhäsiven TLC-Matrix in Kombination mit
- einer absorbierenden Polyurethan-Schaumstoffkomresse und einem superabsorbierenden Vlies sowie
- einem wasserundurchlässigen und dampfdurchlässigen äußeren Träger mit Silikonhafrand.

Diese spezifische Kombination ist eine patentierte Zusammensetzung.

EIGENSCHAFTEN

UrgoTul Foam Border bietet alle Vorteile der Lipidokolloid-Technologie (TLC) und der adhäsiven Silikonhafränder (Aufrechterhaltung eines physiologischen Milieus, Verbesserung der Wundheilung und atraumatischer, schmerzfreier Verbandwechsel).

Lipidokolloid-Technologie (TLC: Technology Lipido Colloid)

Die Lipidokolloid-Technologie (TLC) ist eine innovative, patentierte Technologie, die aus der einzigartigen Kombination von Polymeren und Hydrokolloidpartikeln besteht. Die TLC-Matrix fördert die Wundheilung und ermöglicht den atraumatischen und schmerzfreien Verbandwechsel. Die Hydrokolloidpartikel bilden in Kontakt mit dem Wundexsudat ein Gel und schaffen ein physiologisches Wundmilieu, welches die Wundheilung unterstützt, so dass die in den Reparaturprozess involvierten Schlüsselzellen (Fibroblasten, Keratinozyten, Makrophagen) ihre Wirkung entfalten können. **UrgoTul Foam Border** verbessert somit das Ergebnis der Wundheilung.

Die Wirksamkeit der TLC-Matrix wurde in zahlreichen klinischen Studien mit mehr als 36.000 Patienten nachgewiesen.

Die absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkomresse und das superabsorbierende Vlies von **UrgoTul Foam Border** gewährleisten eine optimale Drainage der Exsudate und schützen vor Mazerationen. **UrgoTul Foam Border** kann auch unter einem Kompressionsverband angewendet werden, sofern dieser verordnet wurde.

Der wasserfeste Träger von **UrgoTul Foam Border** ist weich, sehr anpassungsfähig und nicht okklusiv. Er sorgt für eine gute Anpassung des Wundverbandes an das anatomische Relief der Wunde, verhindert ein Austreten von Flüssigkeiten und schützt die Wunde vor einer bakteriellen Kontamination von außen. Seine hohe Dampfdurchlässigkeit sorgt für die Ableitung der überschüssigen Exsudate und begrenzt das Mazerationsrisiko. Er folgt den Körperbewegungen und gewährleistet so den Patientenkomfort. Dank seiner Silikonhafränder besitzt der Verband eine gute Haftung bei hoher Hautverträglichkeit und kann einfach repositioniert werden. Durch den Hafrand ist eine Fixierung mit einem Sekundärverband nicht erforderlich. Dank seiner Transparenz ist es möglich, die Sättigung des Verbandes zu beobachten und den Verband nur zu wechseln, wenn dies notwendig ist.

Die Eigenschaften von **UrgoTul Foam Border** sind somit vielfältig:

- Verbesserung der Wundheilung
- Absorption und Drainage der Exsudate zur Begrenzung des Mazerationsrisikos
- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen physiologischen Milieus
- Atraumatische und schmerzfreie Verbandwechsel für die Patienten
- Wasserfeste Silikonhafränder
- Sehr anpassungsfähig und leicht zu repositionieren

INDIKATIONEN / ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTul Foam Border wird empfohlen zur Behandlung exsudierender akuter Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) und chronischer Wunden (z.B. Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre, Diabetische Fußulzera).

Die Sakrumform (**UrgoTul Foam Border Sacrum**) wird empfohlen zur Behandlung von Wunden im Sakralbereich (z.B. Druckgeschwüre am Sacrum).

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Vorbereitung der Wunde:
 - Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen.
 - Wenn zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, die Wunde vor dem Auflegen von **UrgoTul Foam Border** sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
 - Die Wundumgebung sorgfältig trocknen.
- Anlegen (Applizieren) des Wundverbandes:
 - Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite des Wundverbandes abziehen.
 - Die mikroadhäsive Seite von **UrgoTul Foam Border** direkt auf die Wunde auflegen (der Abstand zwischen der Wunde und dem adhäsiven Silikonhafrand sollte mindestens 1 cm betragen).
 - Den Wundverband über der Wunde glatt streichen.
 - Einen Kompressionsverband über dem Wundverband anlegen, sofern dieser verordnet wurde.
- Anlegen von **UrgoTul Foam Border Sacrum**:
 - Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite des Wundverbandes abziehen und den Wundverband mit dem spitzen Ende in Richtung der Sakralregion positionieren.
- Ablösen des Wundverbandes:
 - Die gesunde Haut nach unten drücken, eine Ecke des Wundverbandes anheben und diesen vorsichtig ablösen.
- Verbandwechsel:

Der Wundverband **UrgoTul Foam Border** sollte alle 2 bis 4 Tage gewechselt werden und kann, in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde, bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Da die Komresse ein superabsorbierendes Vlies enthält, darf sie nicht zugeschnitten werden. Die Silikonhafränder dürfen jedoch mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden, um den Wundverband an unterschiedliche anatomische Körperstellen anzupassen.
- Bei klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion kann die Behandlung nach Einschätzung durch den behandelnden Arzt auf einen antibakteriellen Wundverband, wie z.B. **UrgoCell Silver**, umgestellt werden.
- Überschüssige Behaarung möglichst nahe der Haut entfernen, um einen guten Kontakt mit der Wunde sicherzustellen.
- Im Fall der gleichzeitigen Anwendung einer Creme, einer Salbe oder einer Emulsion, die Haut vor dem Auflegen des Wundverbandes trocknen lassen.
- Sterile Einzelverpackung zum Einmalgebrauch: Die Wiederverwendung eines zum Einmalgebrauch bestimmten Wundverbandes kann Infektionsrisiken hervorrufen.
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung. Nicht anwenden, wenn diese beschädigt ist.
- Den Wundverband nicht erneut sterilisieren.

ADHESIEF SCHUIMVERBAND MET LICHT KLEVENDE TLC-MATRIX

BESCHRIJVING

UrgoTul Foam Border is een adhesief, lipido-colloïd schuimverband met lichtklevende TLC-Matrix, een innovatieve technologie ontwikkeld door Laboratoires Urgo, bestaande uit:

- Een licht klevende TLC laag gecombineerd met een absorberend polyurethaan schuimverband en een super absorberende laag
- Een dampdoorlatende, waterdichte backing met een siliconen border.

Deze specifieke combinatie is een gepatenteerde innovatie van Urgo.

EIGENSCHAPPEN

UrgoTul Foam Border biedt alle voordelen van TLC en een adhesive siliconen border (vochtig wondmilieu, optimaal genezingsresultaat, pijnloze en atraumatische verbandwisseling).

TLC (Lipido-Colloïde Technologie)

TLC is een gepatenteerde, innovatieve technologie bestaande uit een unieke combinatie van polymeren en cmc deeltjes, die zorgt voor een pijnloze en atraumatische verbandwisseling voor patiënten terwijl ook het genezingsproces wordt bevorderd. In contact met wondexsudaat vormen deze deeltjes een gel die een vochtig wondmilieu creëert. Dit werkt bevorderend voor het genezingsproces doordat belangrijke cellen die betrokken zijn bij het herstelproces (fibroblasten, keratinocyten, macrofagen) in staat worden gesteld hun functie in de wond te vervullen. **UrgoTul Foam Border** optimaliseert zo het resultaat van de wondgenezing.

De werkzaamheid van TLC is aangetoond in verschillende klinische studies waarbij meer dan 36.000 patiënten betrokken waren.

Het absorberend polyurethaan schuimverband en de super absorberende laag van **UrgoTul Foam Border** zorgen voor een hoog absorberend vermogen van exsudaat waardoor maceratie wordt voorkomen. **UrgoTul Foam Border** is geschikt voor onder compressieverband indien voorgeschreven.

De waterdichte backing van **UrgoTul Foam Border** is zacht, goed vormbaar, niet-occlusief en past zich aan de contouren van het wondoppervlak aan. Dit voorkomt lekkage van wondvocht en beschermt de wond tegen vocht en bacteriën van buitenaf. De hoge waterdampdoorlaatbaarheid voorkomt maceratie doordat overtollig exsudaat verwijderd wordt. Het verband rekt mee met het bewegen van het lichaam en zorgt hierdoor voor draagcomfort bij de patiënt. De siliconen border zorgt voor een goede fixatie en is eenvoudig te herpositioneren aangezien deze goed wordt verdragen door de huid. De border maakt een secundair verband overbodig. Doordat het verband transparant is, is het mogelijk te monitoren of het verzadigd is, hetgeen u in staat stelt alleen dan het verband te vervangen wanneer dit nodig is.

De eigenschappen van **UrgoTul Foam Border** zijn:

- Optimaal genezingsresultaat
- Absorberen en draineren van exsudaat waardoor het risico op maceratie afneemt
- Creëren van een vochtig wondmilieu dat gunstig is voor het wondgenezingsproces
- Atraumatische en pijnloze verbandwisseling
- Waterdichte siliconen border
- Goed vormbaar en makkelijk te (her)positioneren

INDICATIES

UrgoTul Foam Border is geïndiceerd voor de behandeling van exsuderende, traumatische wonden (zoals brandwonden, schaafwonden, post operatieve wonden...) en chronische wonden (zoals ulcus cruris, decubitus, diabetische voet).

Voor exsuderende wonden aan het sacrum (sacrale decubitus) bestaat een speciale sacrum versie.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Voorbereiding van de wond:
 - Reinig de wond volgens lokaal protocol,
 - Als een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan voorzichtig met een normale steriele zoutoplossing alvorens **UrgoTul Foam Border** aan te brengen.
 - Droog de omringende huid zorgvuldig.
- Aanbrengen van het verband:
 - Verwijder de beschermfolie.
 - Breng de licht klevende zijde van **UrgoTul Foam Border** op de wond aan (de adhesive siliconen border moet minstens 1 cm van de wond verwijderd zijn).
 - Strijk het verband glad over de wond.
 - Breng, indien voorgeschreven, een drukverband aan over het verband.
- De sacrum versie aanbrengen:
 - Leg het verband aan en zorg dat de punt naar het sacrum wijst.
- Verwijderen van het verband:
 - Duw de gezonde huid naar beneden, pak het hoekje van het verband en verwijder het verband voorzichtig.
- Verbandwisseling:
 - **UrgoTul Foam Border** verband dient gemiddeld om de 2 tot 4 dagen verwisseld te worden. Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de toestand van de wond kan het verband tot maximaal 7 dagen blijven zitten.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Aangezien het centrale kompres een super absorberende laag bevat mag deze niet worden geknipt. De siliconen border mag daarentegen, indien nodig, met behulp van een steriele schaar worden geknipt om deze aan te passen aan de verschillende wondvormen.
- Bij tekenen van een lokale infectie kan de behandeling voortgezet worden met een antibacterieel wondverband uit de Urgo range, afhankelijk van het advies van de specialist.
- Overtollige haren moeten zo dicht mogelijk op de huid worden afgeknipt om een zo goed mogelijk contact van het verband met de wond te garanderen.
- Indien u gelijktijdig een crème, een zalf of een emulsie gebruikt, dient u de huid eerst te laten drogen voordat u het verband aanbrengt.
- Voor éénmalig gebruik. Per stuk en steriel verpakt. Het verband niet opnieuw gebruiken om risico op infecties te voorkomen.
- Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is, omdat de steriliteit dan niet gegarandeerd is.
- Het verband niet opnieuw steriliseren.